

CGM Aloitus

– Dexcom G6-sensorointi Tandem t:slim X2™-insuliinipumpulla

Insuliinipumpun CGM-toiminnon sujuvan käytön aloittamiseksi on tärkeää, että saat riittävästi tietoa. Vastuullasi on käyttää pumpua oikein omassa hoidossa. Tämän tarkistuslistan avulla voit tarkistaa saamasi tiedot. Aloituksen yhteydessä käy lomake läpi ja esitä kysymyksiä epäselvistä kohdista. Rastita ruudut aloituksen jälkeen. Huomioi, että olet voinut saada tietoa myös ennen aloitusta eri tilanteissa.

ESITTELY

CGM perusteet

- Trendiväline
- Ei korvaa VS mittaria
- Näyttää suunnan ja nopeuden
- Hoitopäätös arvon perusteella

CGM aloitus

- Ota lähetin pois pakkauksesta
- Aseta lähetimen SN pumppuun

Asetukset

- Aseta varoitukset
- Korkea ja matala arvo
- Nousunopeus
- Laskunopeus
- Kantaman ulkopuolella
- Kiinteä hälytys 3,1 mmol/l
- Ääni Hypo toisto

Sensorin asetus

- Horisontaalinen
- Vatsa (ihonalainen rasvakerros)
- Puhdista iho
- 7 cm väli infuusiosettiin
- Aseta lähetin koteloon heti
- Aloita jakso - sensorikoodi

Perustoiminnot

- 2 tunnin alustusjakso
- Odota 15 min jaksojen välissä
- Kalibrointivapaa sensorikoodia käytettäessä
- Ei kalibrointia-suositus
- Tarkista verensokeri
- Sensoriarvo siirtyy suoraan annoslaskuriin

CGM-trendi

- Suurena CGM-käyrää
- Glukoosi jatkuvassa muutoksessa
- Nuolet
- Tämän hetkinen CGM-data
- Näyttö 1, 3, 6, 12, ja 24 h
- Värikoodattu
 - Oranssi
 - Valkoinen
 - Punainen

Lopeta sensorijakso

- Automaattisesti 10 vrk jälkeen
- Varoitus 6-, 2 h ja 30 min
- Vahvista lopetus
- Valitse "CGM" ja "Lopeta sensori" - sensoria ei voi uudelleenkäynnistää

Poista sensori/lähetin

- Irroita teippi ihosta, vedä/poista "koko" sensori/lähetin
- Varoitukset 21, 14, ja 7 vrk
- Älä irroita lähetintä kun sensori on edelleen ihosta**
- ÄLÄ HEITÄ POIS lähetintä! Pitkäkäyttöinen – 3 kk**

ALGORITMI

Basal-IQ™-teknologia

- Timantti- ja S-kuvake
- Basal-IQ™ -keskeytys – punainen alue trendinäytössä
- Mitä tapahtuu jatkettulle bolukselle ja tilapäiselle annostelulle keskeytyksen aikana?
- Keskeytys ennen matalaa JOS: sensorin arvon odotetaan laskevan alle 4,4 mmol/l 30 min kuluttua tai arvo on 3,9 mmol/l tai alle (juuri nyt)

- Annostelua jatketaan jos se on ollut keskeytettyinä 2 h viimeisen 2,5 h aikana
- Annostelua jatketaan automaattisesti kun sensoriarvo nousee
- Basal-IQ™ on PÄÄLLÄ
- Valinnaiset varoitukset Keskeyttää/Jatkaa

Control-IQ™-teknologia

- KAIKKI asetukset profiiliin
- Kokonaisvuorokausiannos (min. 10 U) ja paino (min. 25 kg)
- Control-IQ™ on POIS
- Käyttää CGM-arvoa annostelun säätämiseen
- Ennakoi 30 min eteenpäin
- 5 yksinkertaista sääntöä
 - 6,25-8,9 mmol/l Profiilin perusannos
 - ≤ 6,25 mmol/l pienentää perusannosta
 - ≤ 3,9 keskeyttää perusannoksen
 - ≥ 8,9 mmol/l lisää perusannosta
 - ≥ 10 mmol/l automaattinen korjausannos annostellaan
- Annostelua jatketaan kun Control-IQ™ ennakoii sensoriarvon nousevan yli 3,9 mmol/l 30 min kuluttua
- Automaattinen korjausannos 60% max. kerran 60 min
- Timantti- ja tilakuvakeiden eri värit
- Annostelu keskeytetty – punainen alue trendikaaviossa
- Hiilihydraattilaskenta
- Pidennettyä bolusta ei keskeytetä
 - maksimi kesto 2 h

LISÄTIETOA

- Sensoriarvo siirtyy automaattisesti annoslaskuriin – Control-IQ™ PÄÄLLÄ
- VS-tavoite asetettu kiinteästi 6,1 mmol/l
- IOB bolus % perus, 5 h
- Aktiivisuusprofiilit – tilakuvakkeet
- Unitoiminto – Unirytmit
- Liikuntatoiminto
- Kantaman ulkopuolella – 20 min
- Pysäytä annostelu manuaalisesti kun irrotat pumpun kehosta
- Tilapäinen annostelu ei käytössä kun Control-IQ™ PÄÄLLÄ
- Control-IQ™ varoitukset

Varoitukset ja hälytykset

- Kiinteää turvahälytystä 3,1 mmol/l ei saa pois päältä

CGM-historia

- Jaksot ja kalibroinnit
- CGM-varoitukset ja –viat

Vianetsintä

- Pumpun uudelleenkäynnistys –ei lopeta sensoriajaksoa
- Näyttö ulospäin ja samalla puolella kehoa
- Säästä lähettimen SN ja sensorikoodi

Kontraindikaatiot

- MR (magneettikuvaus)
- Kokovartalo-skannaus lentokentällä

Tuki

- Asiakastuki päivällä 8-16
Puh: 020 12 80 180
- rubinmedical.fi

Dexcom G6-sovellus

- Vahvista hälytykset sovelluksessa ja pumpussa jos ne ovat molemmissa päällä (3,1-hälytys on aina aktiivinen)
- Sovellusta käytettävä seuranta-toimintoon

Lain mukaan meidän tulee huolehtia tuotteidemme jäljitettävyydestä. Tämä tarkoittaa, että meidän on tarvittaessa tavoitettava sinut lähettääksemme tärkeää informaatiota. Pyydämme täyttämään alla olevat tiedot.

Täytetty tarkistuslista annetaan edustajallemme tai diabeteshoitajalle, joka toimittaa sen Rubin Medicalille.

Pakolliset tiedot

Pumpun sarjanumero: _____ Ohjelmistoversio: _____

CGM-aloitus pvm: _____

Verkkokoulutus suoritettu? Kyllä Ei

Pumpunkäyttäjän nimi: _____

Osoite: _____

Postinumero: _____ Paikkakunta: _____ Puh: _____

Sähköpostiosoite: _____

Poliklinikka: _____

Olen käynyt läpi tarkistuslistan tiedot. Hyväksyn, että Rubin Medical käsittelee henkilökohtaisia tietojani, jotta se voi lähettää minulle informaatiota Rubin Medicalista, sen tuotteista ja muusta asiaan liittyvästä. Tietojani käsitellään Rubin Medicalin henkilötietokäytännön mukaisesti, joka löytyy verkkosivustollamme www.rubinmedical.fi.

Pumpun käyttäjän allekirjoitus: _____ (vaihtoehtoisesti huoltajan allekirjoitus)