


Control-IQ-teknologia – 5 helppoa sääntöä

Ennakoi CGM-arvojen avulla glukoosipitoisuudet 30 minuuttia eteenpäin

Timantti-kuvake

Alaosa vaihtaa väriä, jos perusannosta pienennetään tai se keskeytetään. Yläosa vaihtaa väriä, jos perusannosta nostetaan, tai annostellaan automaattinen korjausannos.

Punaiset palkit osoittavat insuliiniannostelun pysäytyksen.

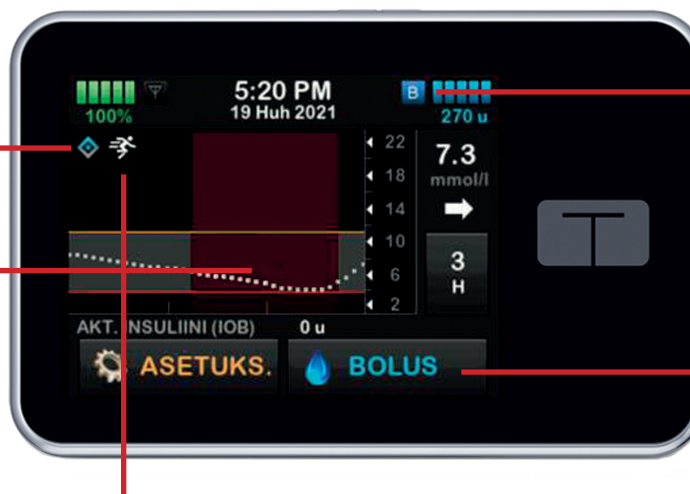

Aktiivisuusprofiili
näkyy jos se on aktivoitu.

Control-IQ™:n

5 erilaista tilakuvaketta voidaan näyttää riippuen insuliiniannostelun säädöstä.

Automaattinen korjausannos.

VAROITUS: Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää Control-IQ™-teknologiaa. Sitä ei myöskään tule käyttää potilaille, jotka käyttävät alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle 25 kiloa. Lisää tärkeitä turvallisuustietoja osoitteessa www.tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2021 Rubin Medical OY. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care on rekisteröity tavaramerkki ja t:slim X2™ ja Control-IQ™ ovat Tandem Diabetes Care Inc. -yhtiön tavaramerkkejä. Kaikki muut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

	Control-IQ™	Uni	Liikunta	
Annotelee	Automaattinen korjausannos, jos sensorin arvon ennakoidaan olevan 10,0 mmol/l tai suurempi 30 minuutin kuluttua (ei unitoiminnossa)	≥10,0	--	≥10,0
Nostaa	Perusannosta nostetaan, jos sensorin arvon ennakoidaan olevan 8,9 mmol/l tai suurempi 30 minuutin kuluttua	≥8,9	≥6,7	≥8,9
Ylläpitää	Annotelee henkilökohtaista ohjelmoitua perusannosta	6,25-8,9	6,25-6,7	7,8-8,9
Vähentää	Perusannosta vähennetään, jos sensorin arvon odotetaan olevan 6,25 mmol/l tai pienempi 30 minuutin kuluttua	≤6,25	≤6,25	≤7,8
Keskeyttää	Perusannostelu keskeytetään, jos sensorin arvon odotetaan olevan 3,9 mmol/l tai pienempi 30 minuutin kuluttua	≤3,9	≤3,9	≤4,4

Arvot tekstissä viittaavat Control-IQ™:n:een ja taulukon arvot koskee aktivoitua uni- ja liikuntaprofiilia.

Tandem t:slim X2™ insuliinipumpun menu – Control-IQ-teknologia

