


# Tandem t:slim X2-insuliinipumpun menu

## Basal-IQ-teknologia

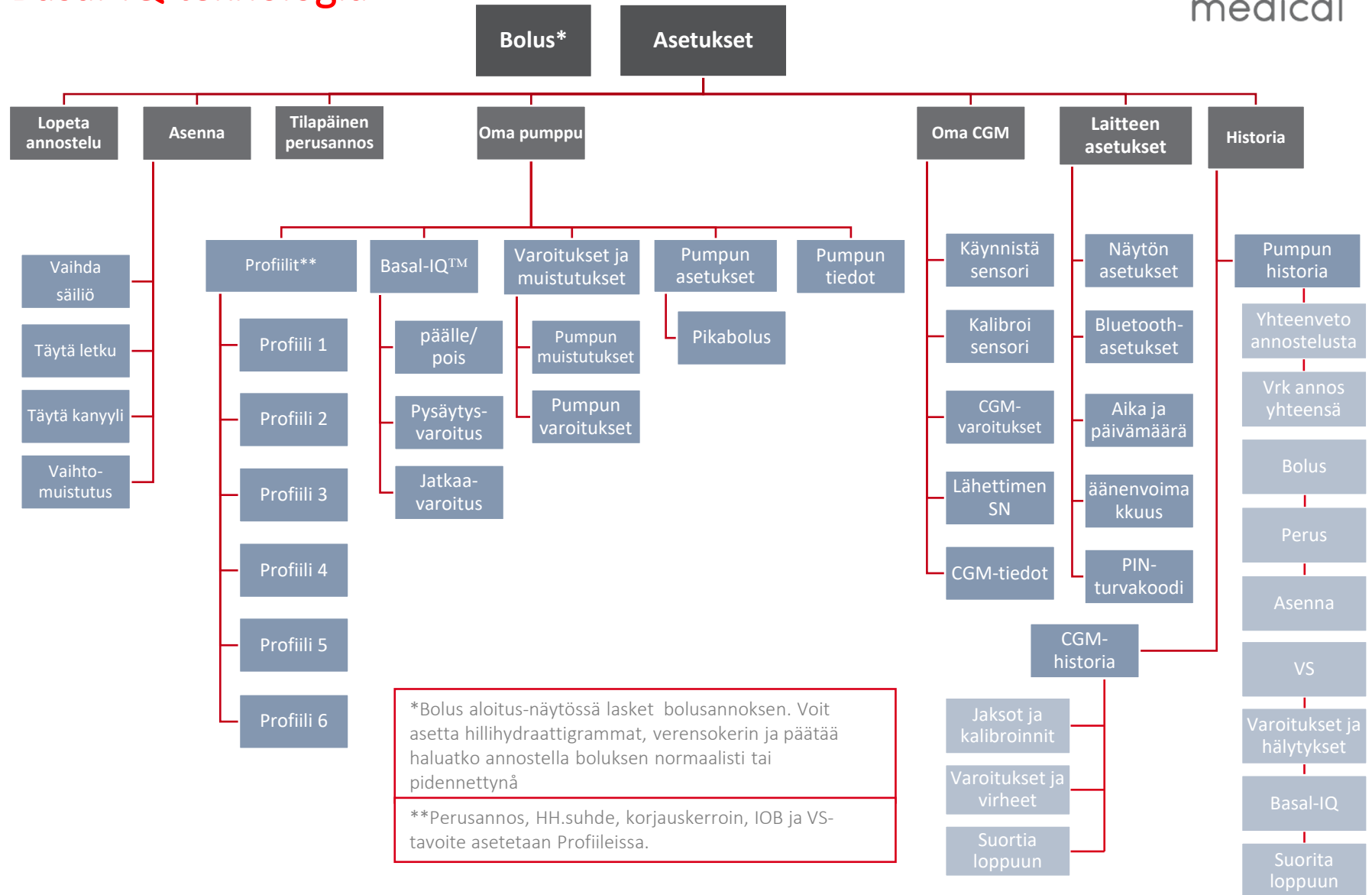

# Basal-IQ™ -teknologia


## Insuliinin annostelu pysäytetään JOS:

- Sensoriarvon ennakoidaan laskevan alle 4,4 mmol/l 30 minuutin kuluttua  
tai
- Sensoriarvo on 3,9 mmol/l tai matalampi (tällä hetkellä)

## Insuliinin annostelua jatketaan JOS:

- Sensoriarvo nousee
- Sensoriarvoa ei ole ollut saatavilla 10 minuuttiin
- Pysäytyksen syyt ovat poistuneet
- Käyttäjä jatkaa annostelua
- Annostelu on ollut pysäytettynä 2 tuntia viimeisen 2,5 tunnin aikana

\* Annostelun jatkaminen on aina etusijalla

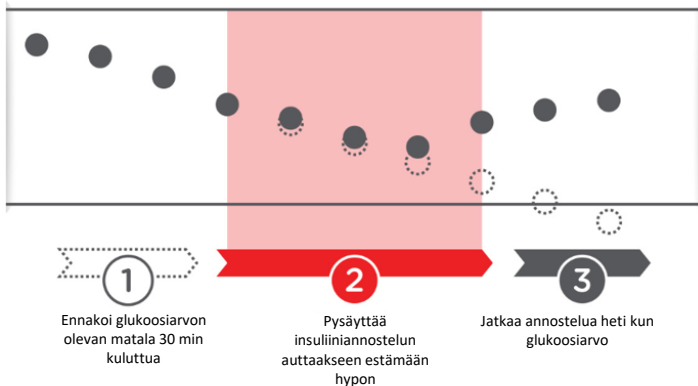

## Milloin annostelun pysäytetään:

- Sensoriarvon ollessa 9-10 mmol/l ja ↓↓
- Sensoriarvon ollessa 8-9 mmol/l ja ↓
- Sensoriarvon ollessa 7-8 mmol/l ja ↘
- Sensoriarvon ollessa 3,9 mmol/l tai matalampi

Timantti-kuvake  
Alaosa on punainen  
annostelun ollessa  
pysäytettynä

"S"-kuvake annostelun  
ollessa pysäytettynä



Punaiset palkit CGM-  
näytöllä osoittavat  
insuliiniannostelun  
pysäytyksen

Annostelu lopetettu