

Ohjelmistopäivitys 7.6

Tandem t:slim X2 -insuliinipumpulle

Control-IQ-teknologialla

Tandem Diabetes Care kehittää jatkuvasti insuliinipumpun ohjelmistoa pumpun käytön optimoimiseksi ja vastataksien käyttäjien toiveisiin.

Tämä ohjelmistopäivitys Tandem t:slim X2™-insuliinipumpuun tarjoaa sinulle entistä paremman käyttäjäystävällisyyden ja selkeämmän kokonaiskuvan.

Uudet toiminnot:

CGM-trendikäyrän **boluskuvakkeilla** saat entistä paremman kokonaiskuvan. Jo pumpun aloitusnäytössä voit nähdä bolus- ja korjausannoksesi, mikä helpottaa oikean hoitopäätöksen tekemistä. Kolme erilaista boluskuvaketta käytetään normaalin boluksen, pidennetyn boluksen ja automaattisen korjausboluksen näyttämiseen.

Uusi kätevä ajastustoiminto, kun haluat lopettaa insuliinin annostelun manuaalisesti. Voit nyt asettaa hälytyksen 15 minuuttiin, 30 minuuttiin, 45 minuuttiin tai 60 minuuttiin, mikä antaa sinulle enemmän joustavuutta. Kun asetettu aika on kulunut, saat muistutuksen annostelun jatkamisesta.

Kun **täytät kanyyliä**, pumppu tarjoaa nyt vaihtoehtoja, jotka sopivat paremmin infuusiosettiisi. Oletusasetus on 0,3 yksikköä, mutta voit myös valita 0,5 yksikköä ja 0,7 yksikköä riippuen siitä, mitä infuusiosettiä käytät. Tämä tekee infuusiosetin vaihtamisesta sujuvampaa. Voit silti syöttää tarvittaessa muun määrän.

Jotta saat muistutuksen vain silloin kun se todella tarvitaan, **"Control-IQ Korkea" -muistutusta on säädetty**. Nyt se toistetaan joka toinen tunti niin kauan kuin muistutuksen asetetut ehdot ovat voimassa tai jos asetetut ehdot tulevat uudelleen voimaan.

Jos **Liikuntatila** ja **Unirytm** ovat päällekkäisiä aikataulun suhteen, pumppu vaihtaa automaattisesti Unirytmiin, kun lopetat Liikuntatilan. Kätevää, jos käytät Liikuntatila myöhään illalla.

Nämä ohjeet koskevat ohjelmistoa 7.6.

Boluskuvakkeet CGM-trendikäyrässä



Normaali bolus




Pidennetty bolus



Automaattinen korjausbolus

Ajastustoiminto kun pumppu pysäytetään manuaalisesti

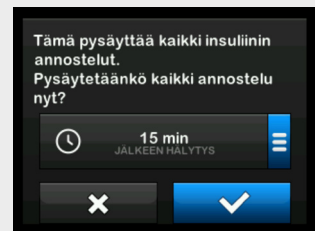

Oletusasetus "Täytä kanyyli"-kohdalle

