


Insuliinipumpun parinmuodostus Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksen kanssa

Kun parinmuodostus on valmis, pumpun ja hoitotiedot siirtyvät langattomasti Tandem Source™ -alustalle*.

Huom: Tämä on lyhennetty ohjeistus. Kaikkia vaiheita ja näyttöjä ei ole esitetty. Tarkemmat tiedot löytyvät Tandem t:slim X2™ -insuliinipumpun käyttöohjeesta.




1

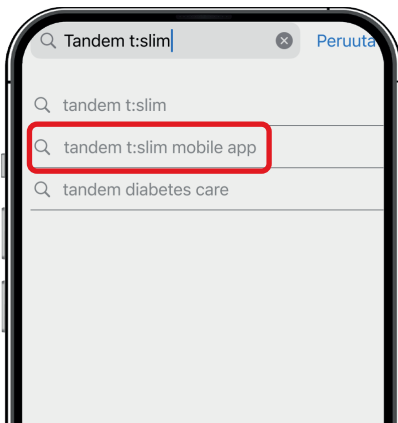

Ladataksesi mobiilisovelluksen, avaa App Store® iPhoneella tai Google Play™ Android-puhelimella, etsi "Tandem t:slim" ja asenna Tandem t:slim X2 mobile app -sovellus.

2

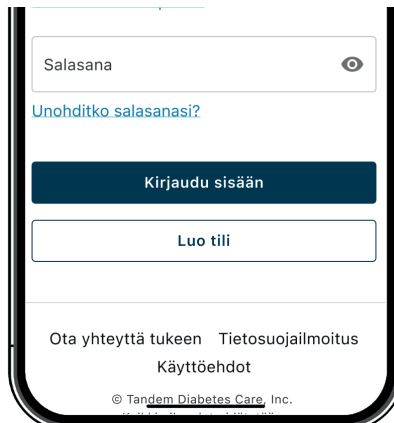

Avaa sovellus ja kirjaudu sisään olemassa olevilla tunnuksilla tai luo uusi tili.



Pumppuvinkki: Älypuhelimien parinmuodostus insuliinipumpun kanssa voidaan vain tehdä Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksen kautta. Pumppu on suunniteltu estämään luvattomat yhteydet.

3



Aloitussäätössä paina **ASETUKSET**.

Huom! Jotta Tandem t:slim X2 -insuliinipumppu toimisi oikein mobiilisovelluksen kanssa, parinmuodostus täytyy tehdä yhteensopivan älypuhelimien kanssa Bluetooth®-yhteyden kautta.

4



Paina valikossa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse **Laitteen asetukset**.

5




Paina **Bluetooth-asetukset**.

6




Paina painiketta **päälle/pois** kohdassa **Mobiiliyhteys**.

7

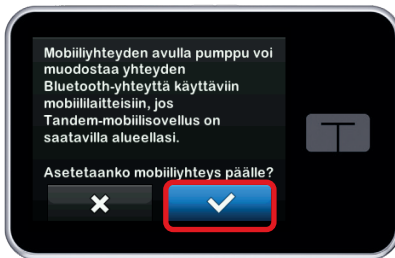

Paina  jatkaaksesi.
Näytölle tulee **MOBIILIYHTEYS**-näyttö.

8

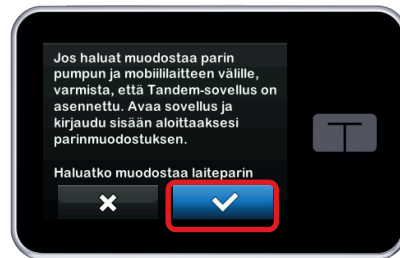

Näytölle ilmestyy vahvistusnäyttö parinmuodostuksen vahvistamiseksi. Paina  jatkaaksesi.

9




Klikkaa **Aloita** sovelluksessa ja sen jälkeen **OK**, vahvistaaksesi että haluat ottaa mobiiliyhteyden käyttöön.

10



Valitse vaihtoehto, joka vastaa insuliinipumppusi sarjanumeroa, ja paina **Seuraava**.

11

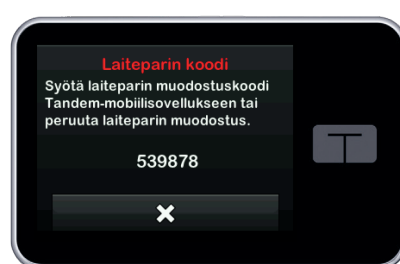

Yksilöllinen parinmuodostuskoodi muodostetaan automaattisesti.

Älä paina  -painiketta, sillä se voi keskeyttää prosessin.

Parinmuodostuskoodi on voimassa vain viisi minuuttia. Jos aika umpeutuu, parinmuodostus täytyy aloittaa alusta.



12




Syötä parinmuodostuskoodi mobiilisovellukseen ja klikkaa **Muodosta yhteys pumppuun**.

13



Pumpun näytölle tulee vahvistusnäyttö. Valitse **OK** jatkaaksesi.

14

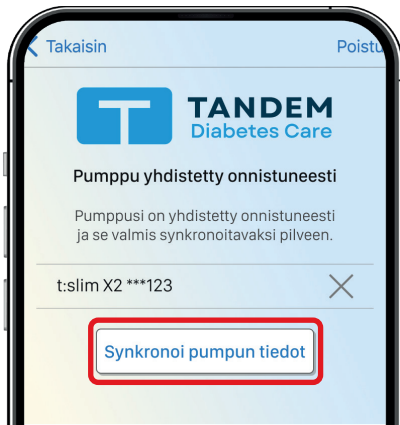

Klikkaa **Synkronoi pumpun tiedot** tuodaksesi uusimmat tiedot pumpusta.

15



Kun Tandem t:slim X2 mobile app -sovellus näyttää pumpun tiedot, sovellus on käyttövalmis.



Vinkkejä sovelluksen käyttöön:

Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksen täytyy olla taustalla aktiivisena, jotta tiedot voivat siirtyä pumpun ja Tandem Source™ -alustan välillä.*

Älypuhelimien asetukset

- ✓ Poista käytöstä puhelimen Zoom-tila, jotta sovellus toimii oikein. Jos Zoom-tila on käytössä, kaikki hoitopäätökset tulee tehdä insuliinipumpun kautta.
- ✓ Ota käyttöön ilmoitukset ja poista akun optimointi, jotta saat pumpun hälytykset ja ilmoitukset puhelimeesi.
- ✓ Aktivoi turvaominaisuudet, kuten näytön lukitus, pääsykoodi tai kasvojentunnistus, ennen kuin annostelet boluksen mobiilisovelluksen kautta.**





* Hoitohenkilökunnan ei tule käyttää Tandem Source -alustan latauksia reaaliaikaiseen etäseurantaan, sillä lataukset eivät siirry reaaliaikaisesti. Tiedonsiirroista voi aiheutua normaaliin mobiiliverkon kustannukset.

** Bolusannostelu Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksen kautta edellyttää yhteensopivaa älypuhelinia ja käyttöjärjestelmää, Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun ohjelmistopäivitystä ja suoritettua koulutusta.

Tärkeää turvallisuustietoa: Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on tarkoitettu insuliinin subkutaaniseen annosteluun, diabetes mellituksen hoitoon insuliinia tarvitsevilla ihmisillä. Pumppu kommunikoi luotettavasti ja turvallisesti yhteensopivien, digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.

Control-IQ-teknologia on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan integroidun jatkuvan glukosimonitorin (CGM) ja Tandem t:slim X2-insuliinipumpun kanssa lisäämään, vähentämään tai keskeyttämään perusinsuliinin annostelun CGM-lukemien ja ennakoitujen glukosiarvojen perusteella. Control-IQ-teknologia voi myös antaa korjausboluksen, kun sensorin arvon ennakoidaan ylittävän ennalta määritetyn arvon. Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, jotka tarvitsevat vähintään 10 yksikön päivittäisen kokonaisinsuliiniannoksen ja jotka painavat vähintään 25 kilogrammaa. Pumppu on tarkoitettu yksittäisen potilaan käyttöön. Katso käyttöohjeesta luettelo yhteensopivista insuliinityypeistä.

VAROITUS: Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää Control-IQ-teknologiaa. Sitä ei myöskään tule käyttää potilaille, jotka käyttävät alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle 25 kiloa.

Järjestelmä ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille, dialyysihoitoa saaville tai kriittisesti sairaille potilaille. Älä käytä järjestelmää hydroksiureahoidon aikana. Pumpun ja järjestelmän käyttäjien on: haluttava ja kyettävä käyttämään insuliinipumppua, CGM-järjestelmää ja kaikkia muita järjestelmän osia kunkin käyttöohjeen mukaisesti, seurattava verensokeriaan hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti; osoitettava riittävää osaamista hiilihydraattien laskennassa; ylläpidettävä riittävää tietämystä diabeteksen omahoidosta, tavattava säännöllisesti terveydenhuollon ammattilainen sekä omattava riittävä näkö ja/tai kuulo, jotta voi havaita kaikki pumpun toiminnot, mukaan lukien varoitukset, hälytykset ja muistutukset. Jos CGM-lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia, verensokeri on tarkistettava verensokerimittarilla ennen diabeteksen hoitopäätösten tekemistä. Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on irrotettava ennen magneettikuvausta (MRI), tietokonetomografiaa (CT) tai diatermiakäsittelyä. Lisätietoja tärkeistä turvallisuusasioista löydät osoitteesta tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksen näytön tiedot eivät aina ole täysin identtiset pumpun näytön tietojen kanssa. Langattomat lataukset Tandem t:slim X2 mobile app -sovelluksesta pilvipohjaiseen Tandem Source -alustaan edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinia sekä langatonta datayhteyttä tai verkkoyhteyttä. Hoitohenkilöstön ei tule käyttää latauksia Tandem Source -alustalle etäseurantaan, koska lataukset eivät tapahdu reaaliajassa. Matkapuhelinoperaattorin tavanomaiset datamaksut voivat koskea latauksia.

Tandem t:slim X2 mobile app -sovellus: Tandem t:slim X2 mobile app -sovellus on tarkoitettu toissijaiseksi näytöksi, Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun peiliksi, ja se voi ladata pumpun tiedot langattomasti Tandem Source -alustalle. Tandem t:slim X2 mobile app -sovellusta ei ole tarkoitettu ohjaamaan insuliinipumppua, eikä sen ole tarkoitus korvata insuliinipumpussa näkyviä tietoja. Annostelupäätöksiä ei pidä tehdä toissijaisen näytön perusteella. Käyttäjän tulee noudattaa CGM-laitteen ja insuliinipumpun ohjeita. Tätä toissijaista näyttöä ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin suosittelemaa omaseurantaa ja itsehoitoa.