

Ohjeet asetuksia varten Tandem t:slim mobile app -sovelluksessa

Tandem t:slim mobile app™ -sovelluksen käyttö edellyttää yhteensopivaa älypuhelinta ja käyttöjärjestelmää. Vieraile osoitteessa tandemdiabetes.com/compatibility, jotta voit varmistaa laitteesi yhteensopivuuden.

Huom: Tämä on lyhennetty opetusmateriaali. Vain tietyt vaiheet ja näytöt näytetään. Yksityiskohtaisempia tietoja Tandem t:slim X2™ -insuliinipumpun käyttöohjeessa.



Pumpputietojen ensimmäinen langaton lataus

Ensimmäinen langaton tietojen lataaminen pumpusta mobiili-sovelluksen kautta Tandem Source™ -alustalle voi kestää muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Suosittelemme käyttämään Tandem Diabetes Care USB-kaapelia, kun lataat pumpputiedot ensimmäisen kerran tietokoneelle. Tämä nopeuttaa tulevia langattomia tiedonsiirtoja.

Älypuhelimien asetukset

✓ Poista zoomaustila käytöstä, kun käytät Tandem t:slim mobile app -sovellusta™.

Jos haluat käyttää Tandem t:slim mobile app -sovellusta, sinun on kytkettävä puhelimen Zoom-tila pois päältä. Löydät asetuksen puhelimesi käyttöaputoimintojen asetuksista.

✓ Poista automaattiset päivitykset käytöstä.

Varmistaaksesi, että sovellus on yhteensopiva käyttöjärjestelmäsi kanssa, ota automaattiset päivitykset pois käytöstä. Näin voit tarkistaa yhteensopivuuden ennen manuaalista päivitystä.

✓ Aktivoi älypuhelimien turvaominaisuudet.

Ennen kuin säädät insuliinin annostelua tai ohjelmoit pumpun, ota käyttöön älypuhelimien turvaominaisuudet, kuten näytön lukitus, salasana tai kasvojentunnistus. Tämä auttaa suojaamaan laitettasi ja tietojasi.

✓ Ota ilmoitukset käyttöön ja salli tarvittavat käyttöoikeudet.

Varmistaaksesi, että saat kaikki pumpun hälytykset ja hälytykset, sinun tulisi:

- Aktivoida älypuhelimien ilmoitukset.
 - Poistaa virransäästötila käytöstä, jotta ilmoitukset eivät esty.
 - Hyväksyä kaikki sovelluksen käyttöoikeusspyynnöt.
- Näin varmistetaan, että pumpun tärkeät viestit eivät jää saamatta.






Tilin luominen ja kirjautuminen

Jos sinulla on jo Tandem Source™ -tili, kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.

Uudet käyttäjät voivat luoda joko Huoltajan tilin tai Henkilökohtaisen tilin.

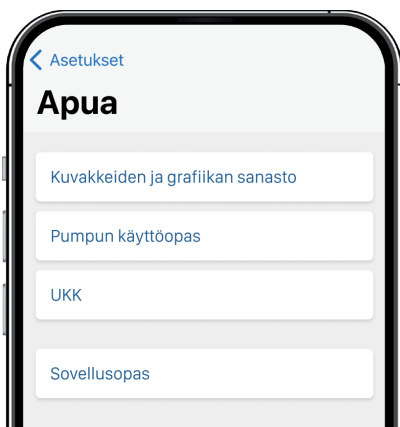

Näytön sisältö ja symbolit

Sovelluksesta löytyy "Kuvakkeiden ja grafiikan sanasto", joka auttaa sinua ymmärtämään näytön symboleja ja grafiikkaa. Löydät oppaan Apua -valikosta Asetukset -kohdasta. Sieltä löydät kuvauksen siitä, mitä kukin kuvake ja graafinen komponentti tarkoittaa.



Valmis aloittamaan?

Käytä Pikaopasta yhdistääksesi Tandem t:slim mobile app™ -sovelluksen Tandem t:slim X2™ -insuliinipumppuun.

Lisäohjeita älypuhelimien asetuksista saat Sovellusoppaasta, joka löytyy myös kohdasta Asetukset > Apua.



Vinkit ja vianetsintä

Hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita mobiilisovelluksen käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.

✓ Pidä puhelin enintään 1,5 m päässä pumpusta.

Jotta yhteys säilyy ja tiedonsiirto toimii, älypuhelin ei saa olla kauempana kuin 1,5 metriä insuliinipumpusta.

✓ Älä sulje sovellusta.

Mobiilisovelluksen on oltava käynnissä taustalla, jotta se voi vastaanottaa ja lähettää tietoja insuliinipumppuun ja insuliinipumpusta. Tämä on tarpeen myös sen varmistamiseksi, että käyttäjä saa kaikki tärkeät ilmoitukset.

✓ Salasana.

Älä koskaan jaa salasanaasi tai anna kenenkään muun käyttää älypuhelimtasi. Näin vältetään insuliinin annostelun tahattomat muutokset ja annostelut.

✓ Vahingoittunut puhelin.

Jos älypuhelimesi on vakavasti vaurioitunut, lopeta mobiilisovelluksen käyttö. Käytä vaihtoehtoista insuliinin annostelusuunnitelmaa, kunnes puhelin on vaihdettu.

✓ Yhteyden katkeaminen.

Jos yhteys katkeaa, tarkista älypuhelimien Bluetooth®-valikosta, että insuliinipumppu on yhdistetty. Jos pumppu ei ole yhdistetty, klikkaa pumpun nimeä luettelossa yhteyden palauttamiseksi.

✓ Yhteysongelmat.

Jos sinulla on ongelmia insuliinipumpun yhdistämisessä mobiilisovellukseen, noudata seuraavia ohjeita:

- Sulje sovellus kokonaan älypuhelimien sovellusasetusten kautta.
- Käynnistä sitten sovellus uudelleen klikkaamalla sovelluksen kuvaketta.





Tärkeää turvallisuustietoa: Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on tarkoitettu insuliinin subkutaaniseen annosteluun, diabetes mellituksen hoitoon insuliinia tarvitsevilla ihmisillä. Pumppu kommunikoi luotettavasti ja turvallisesti yhteensopivien, digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.

Control-IQ-teknologia on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan integroidun jatkuvan glukoosimonitorin (CGM) ja Tandem t:slim X2-insuliinipumpun kanssa lisäämään, vähentämään tai keskeyttämään perusinsuliinin annostelun CGM-lukemien ja ennakoitujen glukoosiarvojen perusteella. Control-IQ-teknologia voi myös antaa korjausboluksen, kun sensorin arvon ennakoidaan ylittävän ennalta määritetyn arvon. Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, jotka tarvitsevat vähintään 10 yksikön päivittäisen kokonaisinsuliiniannoksen ja jotka painavat vähintään 25 kilogrammaa. Pumppu on tarkoitettu yksittäisen potilaan käyttöön. Katso käyttöohjeesta luettelo yhteensopivista insuliinityypeistä.

VAROITUS: Control-IQ-teknologiaa ei saa käyttää alle 6-vuotiailla henkilöillä. Control-IQ-teknologiaa ei myöskään saa käyttää henkilöillä, jotka tarvitsevat alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle 25 kiloa.

Järjestelmä ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille, dialyysihoitoa saaville tai kriittisesti sairaille potilaille. Älä käytä järjestelmää hydroksiureahoidon aikana. Pumpun ja järjestelmän käyttäjien on: haluttava ja kyettävä käyttämään insuliinipumppua, CGM-järjestelmää ja kaikkia muita järjestelmän osia kunkin käyttöohjeen mukaisesti, seurattava verensokeriaan hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti; osoitettava riittävää osaamista hiilihydraattien laskennassa; ylläpidettävä riittävää tietämystä diabeteksen omahoidosta, tavattava säännöllisesti terveydenhuollon ammattilainen sekä omattava riittävä näkö ja/tai kuulo, jotta voi havaita kaikki pumpun toiminnot, mukaan lukien varoitukset, hälytykset ja muistutukset. Jos CGM-lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia, verensokeri on tarkistettava verensokerimittarilla ennen diabeteksen hoitopäätösten tekemistä. Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on irrotettava ennen magneettikuvausta (MRI), tietokonetomografiaa (CT) tai diatermiakäsittelyä. Lisätietoja tärkeistä turvallisuusasioista löydät osoitteesta tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Tandem t:slim X2 Mobile App -sovelluksen näytön tiedot eivät aina ole täysin identtiset pumpun näytön tietojen kanssa. Langattomat lataukset Tandem t:slim X2 Mobile App -sovelluksesta pilvipohjaiseen Tandem Source -alustaan edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinia sekä langatonta datayhteyttä tai verkkoyhteyttä. Hoitohenkilöstön ei tule käyttää latauksia Tandem Source -alustalle etäseurantaan, koska lataukset eivät tapahdu reaaliajassa. Matkapuhelinoperaattorin tavanomaiset datamaksut voivat koskea latauksia.

Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellus: Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellus on tarkoitettu toissijaiseksi näytöksi, Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun peiliksi, ja se voi ladata pumpun tiedot langattomasti Tandem Source -alustalle. Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellusta ei ole tarkoitettu ohjaamaan insuliinipumppua, eikä sen ole tarkoitus korvata insuliinipumpussa näkyviä tietoja. Annostelupäätöksiä ei pidä tehdä toissijaisen näytön perusteella. Käyttäjän tulee noudattaa CGM-laitteen ja insuliinipumpun ohjeita. Tätä toissijaista näyttöä ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin suosittelemaa omaseurantaa ja itsehoitoa.



Lisää pikaoppaita, käyttöohjeita ja opetusvideoita löydät osoitteesta rubinmedical.fi