

1 Luo tili Tandem Sourceen

Käy osoitteessa

→ source.tandemdiabetes.com

Tilin sisäänkirjautuminen

Sähköposti

Unohtuuko sähköpostisi?

Seuraava

Luo tili


Klikkaa **Luo tili** valitaksesi tilityypin ja syöttääksesi tietosi.

2 Lataa pumputietosi Tandem Sourceen



Siirry päävalikossa vasemmalla olevaan kohtaan **Lataa pumppu** ja liitä pumppu tietokoneeseen Tandemin USB-kaapelilla. Klikkaa **Aloita lataus** aloittaaksesi pumputietojen lataamisen.

3 Jaa raportit klinikkasi kanssa

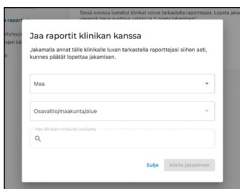

Klikkaa profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse **Tiliasetukset**. Klikkaa sitten **Jaa raportteja** vasemmasta sivuvalikosta etsiäksesi klinikkasi.

*Hoitohenkilöstön ei tule käyttää latauksia Tandem Source -alustaan etäseurantaan, koska lataukset eivät tapahdu reaaliajassa.

Tärkeää turvallisuustietoa: Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on tarkoitettu insuliinin subkutaaniseen annosteluun, diabetes mellituksen hoitoon insuliinia tarvitsevilla ihmisillä. Pumppu kommunikoii luotettavasti ja turvallisesti yhteensopivien, digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.

Control-IQ-teknologia on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan integroidun jatkuvan glukoosimonitorin (CGM) ja Tandem t:slim X2-insuliinipumpun kanssa lisäämään, vähentämään tai keskeyttämään perusinsuliinin annostelun CGM-lukemien ja ennakoitujen glukoosiarvojen perusteella. Control-IQ-teknologia voi myös antaa korjausboluksen, kun sensorin arvon ennakoidaan ylittävän ennalta määritetyn arvon. Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, jotka tarvitsevat vähintään 10 yksikön päivittäisen kokonaisinsuliinannoksen ja jotka painavat vähintään 25 kilogrammaa. Pumppu on tarkoitettu yksittäisen potilaan käyttöön. Katso käyttöohjeesta luettelo yhteensopivista insuliinityypeistä.

VAROITUS: Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää Control-IQ-teknologiaa. Sitä ei myöskään tule käyttää potilaille, jotka käyttävät alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle 25 kiloa.

Järjestelmä ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille, dialyysihoitoa saaville tai kriittisesti sairaille potilaille. Älä käytä järjestelmää hydroksiureahoidon aikana. Pumpun ja järjestelmän käyttäjien on haluttava ja kyettävä käyttämään insuliinipumppua, CGM-järjestelmää ja kaikkia muita järjestelmän osia kunkin käyttöohjeen mukaisesti, seurattava verensokeriaan hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti; osoitettava riittävää osaamista hiilihydraattien laskennassa; ylläpidettävä riittävää tietämystä diabeteksen omahoidosta, tavattava säännöllisesti terveydenhuollon ammattilainen sekä omattava riittävä näkö ja/tai kuulo, jotta voi havaita kaikki pumpun toiminnot, mukaan lukien varoitukset, hälytykset ja muistutukset. Jos CGM-lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia, verensokeri on tarkistettava verensokerimittarilla ennen diabeteksen hoitopäätösten tekemistä. Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on irrotettava ennen magneettikuvausta (MRI), tietokonetomografiaa (CT) tai diatermiakäsittelyä. Lisätietoja tärkeistä turvallisuusasioista löydät osoitteesta tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Tandem Source -alusta on tarkoitettu henkilöille, joilla on diabetes mellitus ja jotka käyttävät Tandem Diabetes Care -insuliinipumppuja, heidän huoltajilleen ja heidän hoitohenkilöstölleen, sekä kotiloissa että kliinisissä ympäristöissä. Tandem Source -alusta tukee diabeteksen hoitoa näyttämällä ja analysoimalla Tandemin insuliinipumppuista ladattuja pumppu- ja hoitotietoja.


Rubin
medical

Rubin Medical Oy • Töölöntullinkatu 8 A 10
00250 Helsinki • support@rubinmedical.fi
+358 (0) 3 422 1150

FI-2284-251001


TANDEM
Diabetes Care

Rubin
medical

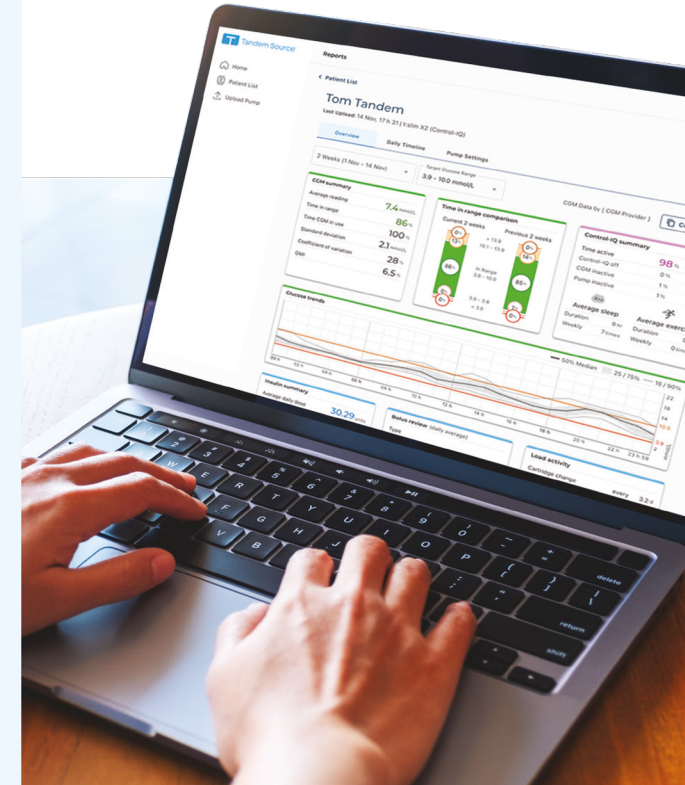

Tandem Source

– työkalu diabeteshoidon tietojen tarkasteluun ja hallintaan.

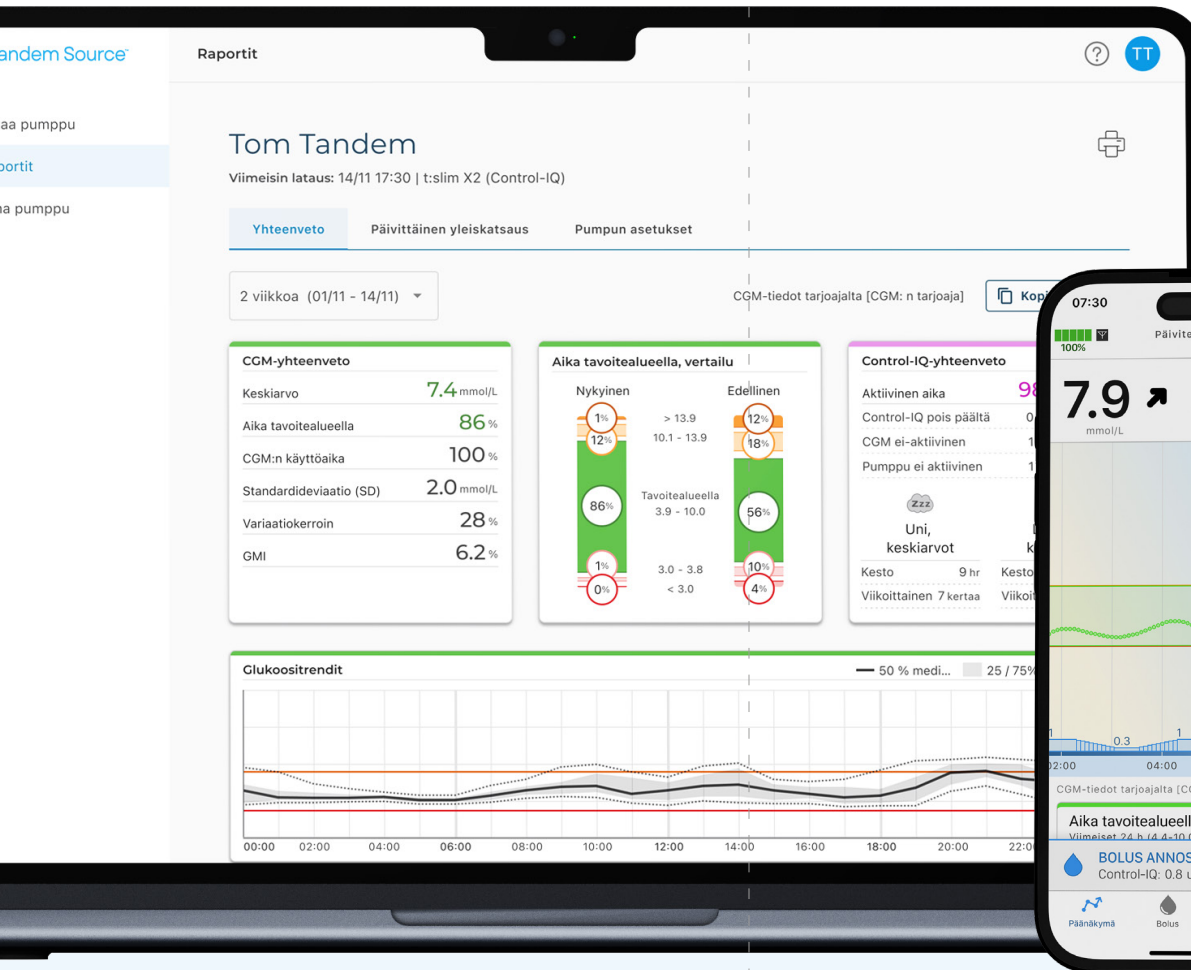


Tandem Source helpottaa Control-IQ-teknologian tietojen tarkastelua ja analysointia

Jos käytät Tandem t:slim-mobiilisovellusta, pumpun tiedot ladataan automaattisesti Tandem Sourceen. Silloin sinun ei tarvitse huolehtia lataamisesta tietokoneella.*



Lue Tandem Source-käyttöohje, jossa on tarkemmat ohjeet tilin luomiseen.

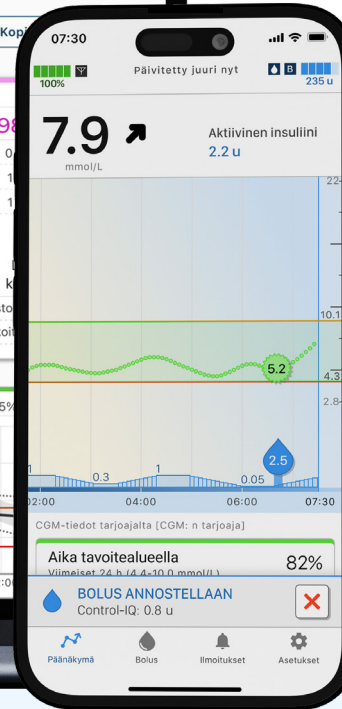

Ei tarvitse asentaa tietokoneohjelmaa

Tandem Source -alusta on verkkopohjainen. Voit ladata pumpputiedot manuaalisesti kaapelilla tai langattomasti Tandem t:slim-mobiilisovelluksen kautta.



Kolme helppolukuista raporttia

Tutustu kolmeen helppolukuiseen raporttiin, jotka sisältävät pumppu- ja hoitotietosi. Jaa tieto klinikallesi, jotta voit yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdä tarvittavat muutokset hoitoosi.



Täysin maksuton

Tandem Source -alusta on käytettävissä sekä sinulle että terveydenhuollon ammattilaiselle ilmaiseksi.