

Aloita Dexcom Followin käyttö

Dexcom Follow -sovellus näyttää sensorin arvot Dexcomin jatkuvaa glukoosimittausta (CGM) käyttäviltä käyttäjiltä. Voit käyttää Dexcom Follow -sovellusta tarjotaksesi heille tukea arjessa. Kun Dexcom-käyttäjä jakaa CGM-tietonsa kanssasi, voit nähdä sensorin arvot ja trendinuolet sekä saada ilmoituksia, kun glukoositaso nousee liian korkeaksi tai laskee liian matalaksi.



* Tietojen jakamiseen tarvitaan internetyhteys. Seuraajan oleminen edellyttää Follow-sovelluksen käyttöä. Jakajan tulisi käyttää Dexcom CGM -järjestelmää tehdäkseen hoitopäätöksiä. Älä käytä Dexcom Follow -sovelluksen tietoja hoitopäätösten tekemiseen, kuten matalan glukoosiarvon hoitoon tai annostelupäätöksiin korkean glukoosiarvon yhteydessä. Noudata Dexcom CGM -järjestelmän ohjeita tehdessäsi hoitopäätöksiä.

1 jakaja lähettää kutsun

Jos haluat kutsua seuraajan, mene Dexcom G7 tai G6 -sovelluksessa kohtaan **Liitännät > Share**. Noudata puhelinsovelluksessa näkyviä ohjeita. Jakaja voi kutsua seuraajia yhteystiedoistaan tai antamalla nimen ja sähköpostiosoitteen.

2 aloita seuraaminen


Asenna Dexcom Follow -sovellus ja hyväksy kutsu. Aloittaaksesi Dexcom Followin käytön, luo Dexcom-tili ja käy läpi sovelluksen esittely.

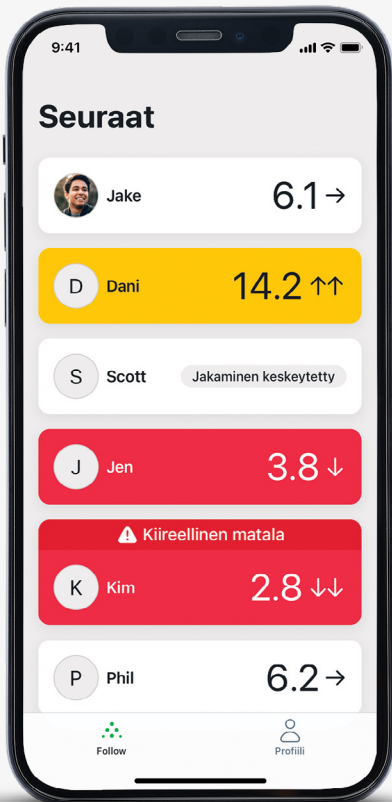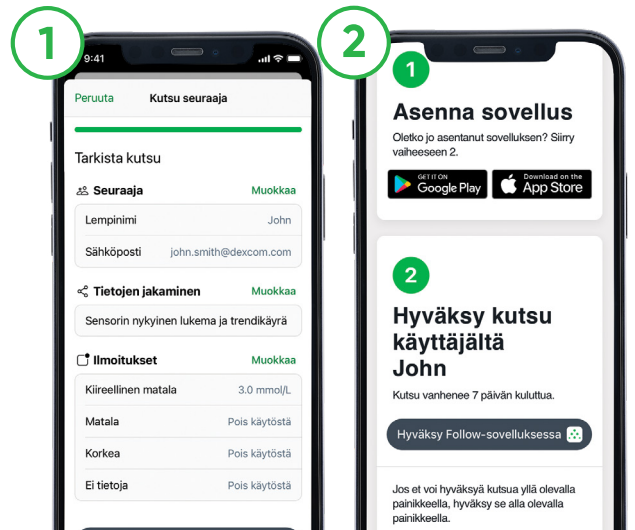

Takaisin aloitusnäyttöön

Jakajan nimi ja kuva

Trendikäyrä (näkyvä vain jakajan luvalla)

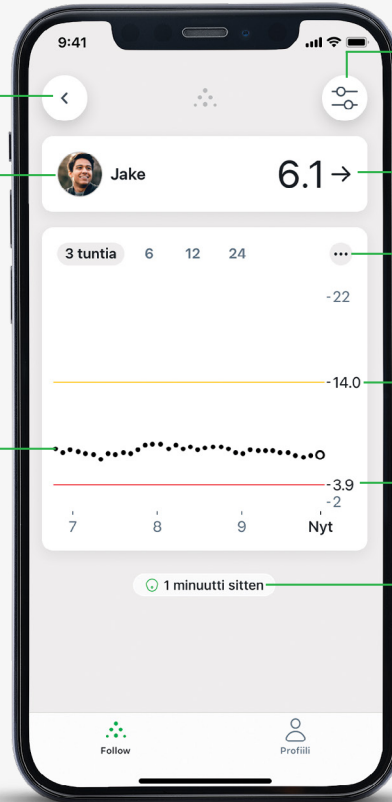

Paina muokataksesi Jakajan profiilia (Muokkaa jakajan valokuvaa, nimeä ja suhdetta)

Sensoriarvo ja trendinuolet

Klikkaa muokataksesi ilmoituksia

Korkean varoituksen raja

Matalan varoituksen raja

Viimeksi päivitetty



Aloitusnäyttö, jossa näkyy Jakaja (Seuranta jopa 25 Jakajalle)

Paina Jakaja-välilehteä nähdäksesi hänen tietonsa

Kuinka mukautat asetuksia

Voit valita, mitä ilmoituksia haluat saada kultakin Jakajalta. Muokkaa asetuksia Dexcom Follow -sovelluksessa kohdassa **Profiili > Asetukset**.

Jakaja päättää, voitko nähdä hänen trendikäyränsä.

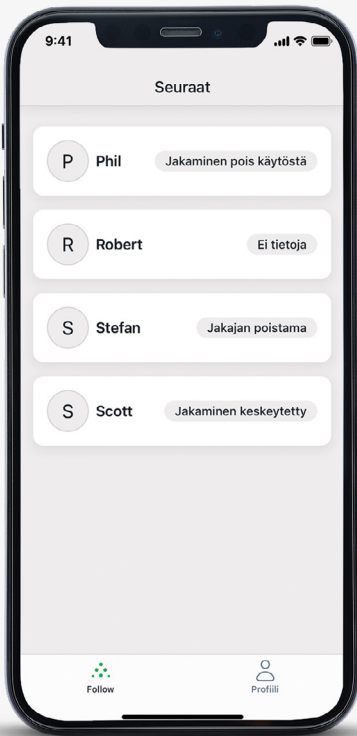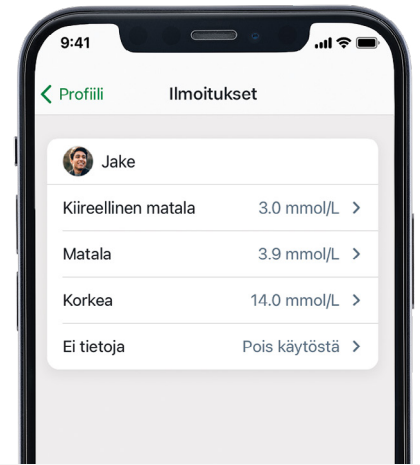

Vianetsintä

Miksi en saa sensori-ilmoituksia?

Tarkista jakamisen tila: Jos näet **Jakaminen lopetettu**, **Ei tietoja**, **Jakajan poistama**, tai **Yhteys katkaistu** et saa Varoituksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä itse Jakajaan.

Tarkista laitteen asetukset: Siirry laitteen asetuksiin, sitten kohtaan **Varoitukset** ja valitse **Salli ilmoitukset** Dexcom Follow -sovellukselle

Tarkista Dexcomin palvelinten tila: Käy osoitteessa status.dexcom.com ja tarkista, onko meneillään palvelinhäiriöitä.

Tarkista jakajan ilmoitusasetukset: Varmista, että haluamasi ilmoitukset on otettu käyttöön kohdassa **Profiili > Ilmoitukset**.

Tarkista myös ilmoitusten viiveasetukset. Jos viive on käytössä, saat ilmoituksen vain, jos tila kestää viivettä pidempään.


Tarkista internetyhteydet: Varmista, että sekä sinulla että jakajalla on aktiivinen internetyhteys.

Tarkista jakajan puhelin: Varmista, että hänen Dexcom CGM -sovelluksensa on auki ja käynnissä puhelimessa.



Vaakatila

Näet viimeisten 24 tunnin sensoriarvot kääntämällä älypuhelimesi vaakatilaan.

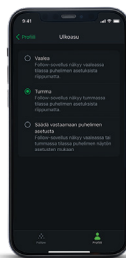

Tumma tila

Vaihda vaalean ja pimeän tilan välillä siirtymällä kohtaan **Profiili > Ulkoasu**.



Yhteensopiva älykellon kanssa

Vastaanota sensoriarvot ja ilmoitukset Apple Watchiin.