




# Yhdistä Tandem-tilisi Glookoon

Tilien yhdistäminen on helpoin tapa nähdä koko diabeteskuvasi yhdessä paikassa. Voit muodostaa yhteyden muutamassa minuutissa joko Glooko Mobile App -sovelluksella tai tietokoneellasi verkkosovelluksen kautta.

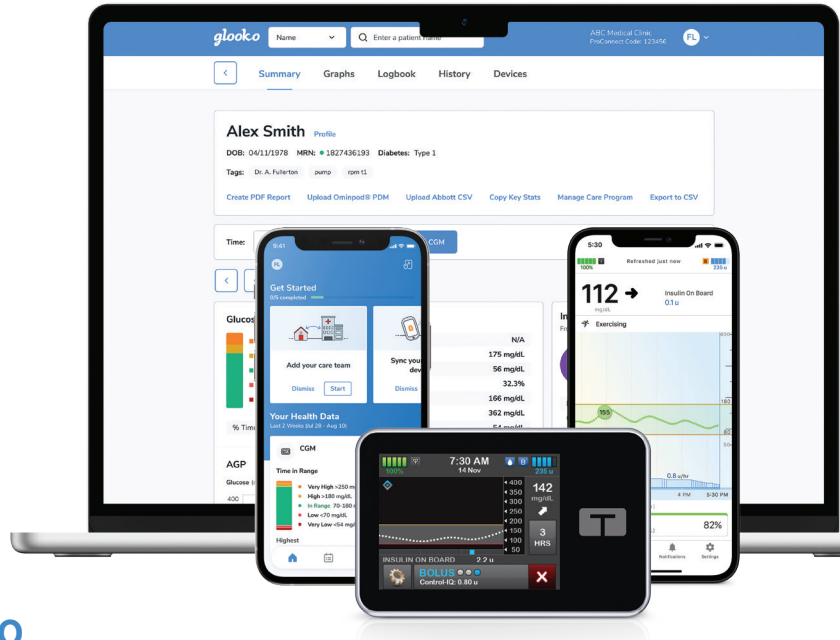


## YHTEYDEN MUODOSTAMINEN GLOOKO MOBILE APP -SOVELLUKSEN KAUTTA

1. **Käynnistä Glooko:** Avaa sovellus älypuhelimessasi.
2. **Lisää laitteesi:** Napauta Yhdistetyt laitteet -painiketta oikeassa yläkulmassa ja valitse **Lisää laite**.
3. **Valitse diabetestili:** Etsi ja napauta luettelosta Tandem Source -kohta ja napsauta sitten **Seuraava**.
4. **Kirjaudu sisään:** Sinut ohjataan Tandem-portaaliin. Syötä tässä vaiheessa Tandem-tilisi tunnistetiedot.

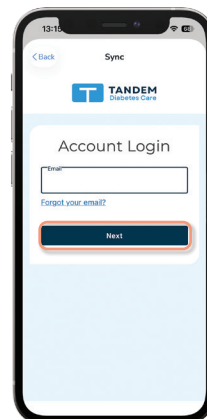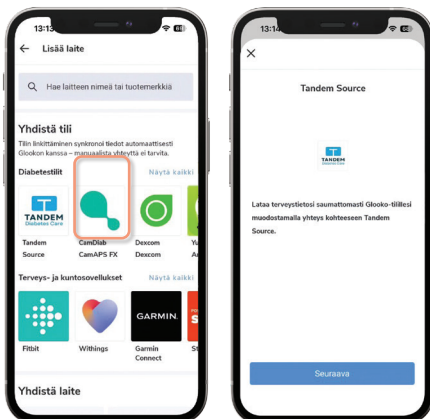


5. Napsauta tilin vahvistusnäytöllä kohtaa **Yhdistä** salliaksesi tietojen jakamisen Tandem-lähteen ja Glookon välillä.
6. **Valmista!** Esiin tulee vahvistusnäyttö, joka osoittaa, että tilisi on yhdistetty onnistuneesti.

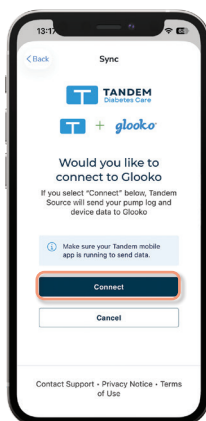


# YHTEYDEN MUODOSTAMINEN GLOOKO WEB APP -VERKKOSOVELLUKSEN KAUTTA

**1. Kirjaudu sisään:** Siirry verkkosivulle [my.glooko.com](https://my.glooko.com) ja kirjaudu sisään.


**2. Avaa laitteet:** Siirry **Laitteet**-välilehdelle ja napsauta **Lisää laite** -kohtaa.

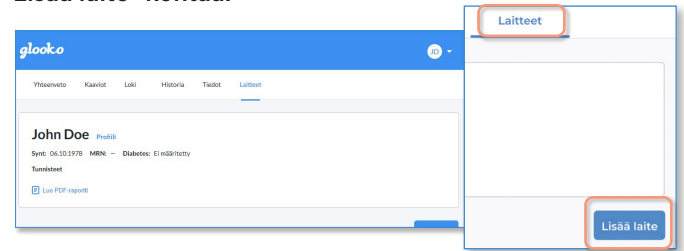


**3. Valitse diabetestili:** Etsi ja napauta luettelosta Tandem Source -kohta ja napsauta sitten **Yhdistä**.

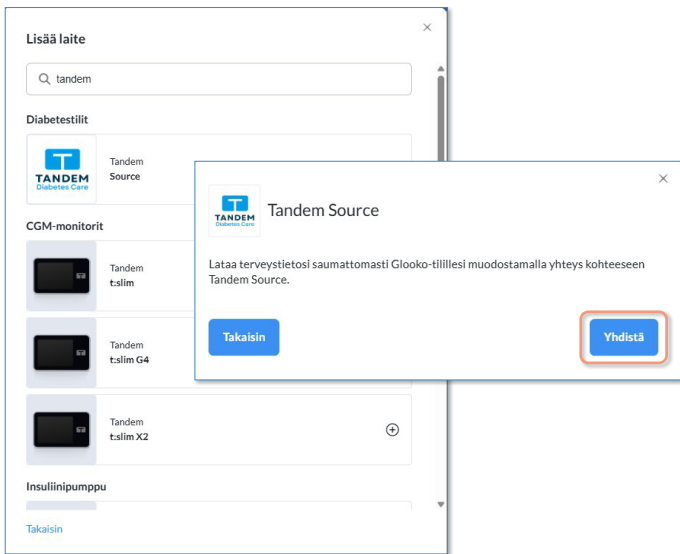


**4. Kirjaudu sisään:** Sinut ohjataan Tandem-portaaliin uudessa ikkunassa tai välilehdessä. Syötä tässä vaiheessa Tandem-tilisi tunnistetiedot.

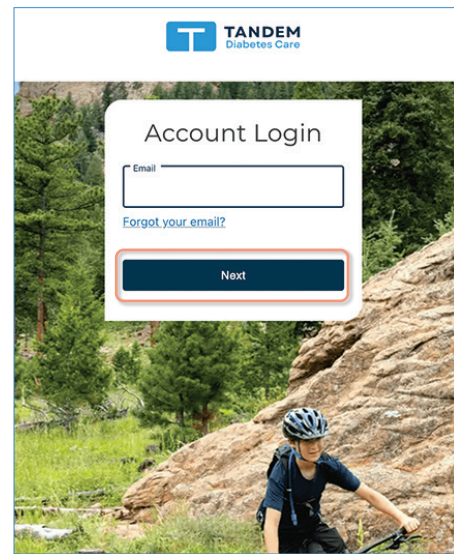

**5. Napsauta tilin vahvistusnäytöllä kohtaa **Yhdistä** salliaksesi tietojen jakamisen Tandem-lähteen ja Glookon välillä.**

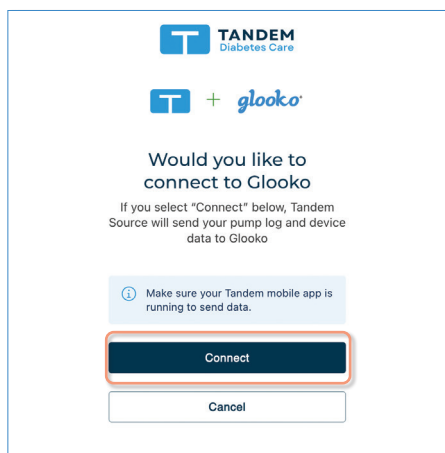

**6. Valmista!** Esiin tulee vahvistusnäyttö, joka osoittaa, että tilisi on yhdistetty onnistuneesti.

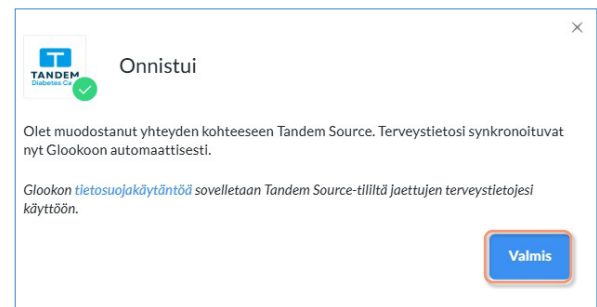

**Tarvitsetko apua?** Jos kohtaat ongelmia linkitysprosessin aikana, tukitiimimme auttaa sinua mielellään osoitteessa [help@glooko.com](mailto:help@glooko.com).

Tässä asiakirjassa kuvatut tuotteet ja yhteensopivuus eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa, joissa Glooko toimii. Kaikki tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta, ja niiden käyttö vaatii luvan. Tuotteen ulkonäkö voi vaihdella kuvissa näytetyistä. Tandem-turvallisuustiedot: [tandemdiabetes.com/safetyinfo](https://tandemdiabetes.com/safetyinfo)